



het dopje steken en kunt u zich hieraan verwonden. Pak de prikpen daarom nooit vast aan de voorzijde van het dopje. Als u de prikpen heeft laten vallen, moet u voorzichtig zijn bij het oprapen. Trek het dopje van de prikpen. Let er hierbij op, dat u zich niet aan het lancet verwondt. Werp in ieder geval het lancet uit en gooi het lancet weg.

Plaats uitsluitend CoaguChek® Softclix-, Accu-Chek® Softclix- of Accu-Chek® Softclix XL-lancetten in de CoaguChek® XS Softclix-prikpen. Andere lancetten kunnen de werking van de prikpen negatief beïnvloeden of de prikpen beschadigen.

Voorbereiding

Vóór het verkrijgen van bloed moet u uw handen met warm water en zeep wassen (zie 1). Droog uw handen goed af. Hierdoor wordt vervuiling van de prikplaats verminderd en de doorbloeding gestimuleerd.

Plaatsen van een lancet

Om met de prikpen bloed te kunnen verkrijgen, moet er een lancet in worden geplaatst.

- Trek het dopje van de prikpen (zie 2).
- Plaats een nieuw lancet tot de aanslag in de lancethouder (zie 3). Bij het plaatsen van het lancet dient u een "klik" te horen.
- Draai het beschermingskapje van het lancet af (zie 4).
- Plaats het dopje weer op de prikpen. Hierbij moeten het gleufje in het dopje en de lijn voor weergave van de ingestelde prikdiepte op de prikpen op één lijn liggen (zie 5). Bij het plaatsen van het dopje dient u een "klik" te horen.

Instellen van de prikdiepte

U kunt 11 prikdiepten (van 0,5 tot 5,5) instellen. De ingestelde prikdiepte wordt in het venster weergegeven. Hoe hoger het cijfer, des te groter de prikdiepte. Als u nog geen ervaring met deze prikpen heeft, adviseren wij u om een geringe prikdiepte, b.v. prikdiepte 2, in te stellen.

- Draai het dopje tot de gewenste prikdiepte ingesteld is (zie 6).

Spannen van de prikpen

Om bloed te kunnen verkrijgen, moet u de prikpen spannen.

- Druk de aanspanknop zo ver mogelijk in (zie 7). Druk hierbij niet gelijktijdig op de prikknop.

De prikpen is gespannen, als in de doorzichtige prikknop een gele punt zichtbaar wordt (zie 8).

Span de prikpen pas vlak voor het prikpen.

Verkrijgen van een bloeddruppel

Voor het verkrijgen van bloed zijn in principe alle vingertoppen geschikt. Bepaalde vingers kunnen echter niet geschikt zijn door bijvoorbeeld een infectie van de huid of van een vingernagel. Wij bevelen aan om het capillair bloed van de zijkant van de vingertoppen af te nemen, omdat de pijn prikkel op deze plaatsen het kleinst is.

Gebruik voor het verkrijgen van bloed telkens een nieuw lancet. Hiermee verkleint u het risico van infecties en is het verkrijgen van bloed vrijwel pijnloos.

- Gebruik de prikpen uitsluitend met het dopje op de prikpen. Zonder dopje wordt de punctie te diep en kan deze pijnlijk worden.

- Druk de prikpen stevig op de gewenste prikplaats (zie 9).
- Druk op de prikknop (zie 10).

Het lancet wordt hierdoor ontspannen en dringt de huid binnen.

- Stimuleer de vorming van een bloeddruppel door over de vinger in de richting van de vingertop te wrijven.

Niet in de vinger knijpen of erop drukken. Weefselvloeistof kan anders met het bloed worden gemengd, hetgeen tot onjuiste stollingswaarden leidt.

De verkregen hoeveelheid bloed is afhankelijk van de prikdiepte en de druk, waarmee de prikpen op de huid wordt geplaatst. Als de verkregen hoeveelheid bloed niet voldoende is, moet u de prikpen de volgende keer harder op de huid drukken. Als dit onvoldoende effect heeft, moet u daarnaast stapsgewijze de prikdiepte vergroten. Als er teveel bloed vrijkomt, moet u de prikdiepte verkleinen.

- Voer de meting van uw stollingswaarde direct na het verkrijgen van het bloed uit overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van uw meter.

Wij adviseren om de prikplaats hierna met een pleister tegen vervuiling te beschermen.

Uitwerpen van het gebruikte lancet

- Trek het dopje van de prikpen (zie 2).
- Schuif het uitwerpmechanisme naar voren (zie 11).

Het gebruikte lancet wordt vervolgens uitgeworpen.

- Plaats het dopje weer op de prikpen.
- Gooi de gebruikte lancetten weg conform de in uw land geldende voorschriften.

Gooi de gebruikte lancetten op een zodanige wijze weg, dat verwonding aan de naald uitgesloten is.

Bewaren van de prikpen

Bewaar de prikpen nooit in gespannen toestand of bij hoge temperaturen, b.v. in een hete auto. Het functioneren kan hierdoor worden belemmerd.

Bewaar de prikpen uitsluitend zonder hierin een lancet te plaatsen.

De prikpen en het dopje reinigen en ontsmetten

Om de overdracht van infecties te voorkomen, moet u de prikpen en het dopje regelmatig reinigen en ontsmetten:

- bij verontreiniging met bloed,
- altijd voordat iemand anders, b.v. om u te helpen, de prikpen in de hand neemt.

U heeft niet-pluizende doeken, waarmee u de prikpen volledig kunt ontkalken, water en 70 % isopropanol nodig.

Voordat u de prikpen en het dopje ontsmet, moet u deze eerst reinigen om bloed en andere verontreinigingen te verwijderen.

Om de prikpen en het dopje niet te beschadigen:

- Dompel de prikpen en het dopje niet onder in vloeistoffen.
- Gebruik voor het reinigen uitsluitend water en voor het ontsmetten uitsluitend 70 % isopropanol.

- Trek het dopje van de prikpen (zie 2).
- Werp het gebruikte lancet uit (zie 11).

Reinigen

- Bevochtig een doek lichtjes met water.
- Maak de prikpen en het dopje goed schoon, de prikpen alleen aan de buitenkant (zie 12) en het dopje zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant (zie 13).
- Droog de prikpen en het dopje goed af met een droge doek.

Ontsmetten

- Bevochtig een doek goed met 70 % isopropanol.
- Maak de prikpen en het dopje elk gedurende 2 minuten goed schoon, de prikpen alleen aan de buitenkant en het dopje zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant.

Wijzing

Softclix-prikpen is een nauwkeurig en nagenoeg capillair bloed uit de prikpen kan op de prikpen worden ingesteld aan uw vinger.

Wijzing vindt u de gebruiksaanwijzing.

aan, dat er mogelijk schade of gevaar voor u kan ontstaan.

op handelingen, die u moet uitvoeren aan de prikpen.

De CoaguChek® XS Softclix-prikpen is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik!

De prikpen mag uitsluitend worden gebruikt voor het verkrijgen van bloed van één en dezelfde persoon.

Als de prikpen ook door anderen, met inbegrip van familieleden, wordt gebruikt of als medische beroepsbeoefenaren de als medische prikpen gebruiken voor het verkrijgen van bloed bij meerdere personen, bestaat het risico van overdracht van infecties. Deze prikpen is hierdoor dan ook niet geschikt voor professionele toepassing in gezondheidszorginstellingen.

- Bewaar de prikpen, inclusief alle onderdelen, buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar. Er bestaat verstikkingsgevaar, als kleine onderdelen (b.v. dopjes en dergelijke) ingeslikt worden.
- Als u de prikpen met een hierin geplaatst lancet heeft laten vallen, is het mogelijk, dat het lancet los in de lancethouder is komen te zitten. Het kan hierdoor niet meer worden gebruikt voor het verkrijgen van bloed. In weinig voorkomende gevallen kan het lancet zelf door de opening voor het lancet uit de prikpen vallen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
 Voor eenmalig gebruik.
 Houdbaar tot 2015-04.
 Gesteriliseerd.
 Fabrikant.
 Artikelnummer.
 Lotnummer.
 Global Trade Item Number.
 Dit product voldoet aan de Europese richtlijn inzake medische apparatuur.

© 2015 Roche Diabetes Care
 COAGUCHEK, SOFTCLIX en andere zijn merken van Roche.

 Roche Diabetes Care
 Sandhofer Strasse 11
 68305 Mannheim
 Germany
 www.coaguheck.com
 www.roche.com